



Nova cena:90,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Maske za lice za višekratnu upotrebu sa lastišem, 100% pamuk, dezen CAMOUFLAGE Tekstilna maskica - pokriva? za usta i nos, naravnjena od tkanine sirovinskog sastava 100% pamuk, sa lastišem koji se ka?i oko ušiju. Ovo nije li?na zaštitna oprema kategorije II i III koja podleže sertifikaciji i ne predstavlja efikasnu zaštitu u sredinama sa izraženim rizikom od virusa, ve? se koristi kao pomo?na, preventivna zaštita za svakodnevnu upotrebu. Preporu?eno održavanje: maskicu je pre prvog koriš?enja, kao i prilikom ponovnog koriš?enja, potrebno oprati (do 60 stepeni), poprskati 70% alkoholom i ispeglati na visokoj temperaturi (samo pamu?ni deo, ne i lastiš), kako bi se eliminisala eventualna kontaminiranost platna. Pamu?na maskica nije preporu?ljiva za celodnevno koriš?enje, jer se vlaži dahom, pa ih je potrebno redovno menjati novim, na najviše 2-3 sata. Maskica se može koristiti više puta, do ošte?enja, kada ju je potrebno baciti. Koriš?enje ovakvog vida zaštite u uslovima epidemije ni u kom slu?aju ne predstavlja dovoljnu zaštitu ve? je prevashodno potrebno pridržavati se svih saveta Ministarstva zdravlja i uputstava na sajtu www.covid-19.rs .



Opis

OVAJ PROIZVOD SE PREPORU?UJE ZA ZAŠTITU OD KORONA VIRUSA!



Maske za lice za višekratnu upotrebu sa lastišem, 100% pamuk, CAMOUFLAGE

Maske su izra?ene po uputstvima Zavoda za javno zdravlje i zadovoljavaju slede?e kriterijume:

- jednoslojne su
- izra?ene od materijala perivog na temperaturi do 60C
- višekratne su, a broj koriš?enja nije ograni?en. Mogu se koristiti onoliko puta koliko materijal može da istrpi pranja i habanja.
- izra?ene su od materijala u kamuflažnom dezenu
- izra?ene su sa lastišem
- mogu se peglati na srednjoj temperaturi ku?ne pegle
- umesto pranja na visokim temperaturama, dovoljno je masku držati 20 sekundi u klju?aloj vodi, efekat je isti (po preporuci lekara).

Napominjemo da se cena od 120din po komadu, koju je Vlada Srbije propisala Uredbom odnosi isključivo na jednokratne maske uvezene iz Kine i da cena od 120din za ove maske nije obavezujuća.

Kvalitet maske se kontroliše redovno od strane referentne laboratorije.

Maske su proizvedene u Srbiji (domaća proizvodnja)

Uputstvo za upotrebu i održavanje:

- Masku staviti na lice pomoću lastiša tako da usta i nos i brada budu prekriveni. Staviti tako da vazduh ne može prolaziti ispod i oko maske.

- PAŽNJA: Proizvod nije sterilan! Pre upotrebe oprati na 60°.

- Proizvod se može sterilisati od bakterija i virusa pranjem na 60° , peglanjem na srednjoj jačini pegle, ili umakanjem u ključalu vodu na 20-30 sekundi.

PAKOVANJE:

Kesa sa 10 komada

ROK TRAJANJA:

Neograničeno

SASTAV:

100% Pamuk

DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savić - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs